



1

Place item in pouch.  
Colocar dentro de la bolsa.  
Placer l'article dans le sachet.  
Artikel in den Beutel legen.  
Inserire l'oggetto nella busta.

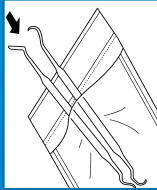


2

Peel off protective strip from adhesive band.  
Quitar la tira protectora de la banda adhesiva.  
Retirer le film protecteur de la bande adhésive.  
Den Schutzstreifen vom Klebeband entfernen.  
Togliere la striscia protettiva dalla banda adesiva.

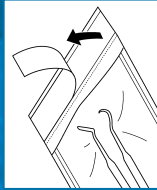

3

Fold over paper flap along fold and press down firmly from the center outwards.  
Doblar la aleta de papel por el pliegue y apretar firmemente desde el centro hacia afuera.  
Plier le rabat de papier le long du pli et presser fermement à partir du centre vers l'extérieur.  
Die Papierklappe an der Faltnähe umfallen und von der Mitte nach außen hin fest andrücken.  
Ripiegare la banda adesiva lungo la linea tratteggiata premendo con decisione dal centro verso l'esterno.

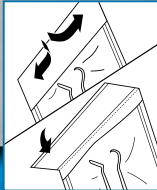

The top indicator will change color when steam or chemical vapor processed.

La parte superior cambia de color al ser procesado mediante autoclave o productos químicos.

Les indicateurs de couleur changent après stérilisation.

Die oberen Indikator wechseln nach der Dampfsterilisation oder Chemikalie ihre Farbe.

Il set superiore cambia colore quando è stato effettuato il processo di sterilizzazione a vapore o chimiciave.

The bottom indicator will change color when ethylene oxide processed.

La parte inferior cambia de color al ser procesado con óxido de etileno.

Les indicateurs de couleur changent après stérilisation.

Die unteren Indikator wechseln nach der Sterilisation mit Ethylenoxid ihre Farbe.

La parte inferiore cambia colore quando il processo di sterilizzazione a ossido di etilene è stato effettuato.



**DE Healthcare  
Products  
Gillingham  
ME8 0SB U.K.**

**CYBER TECH**

LOT